



IZI Medical

# TM4003-XX INDICATOR<sup>®</sup>

## EN

Indicator DOTS for X-Ray and CT

1. Prep skin to remove excess oil and hair as necessary.
2. Remove marker from backing.
3. Press the exposed adhesive of the marker against the skin.
4. Rub firmly to ensure adhesion.
5. Remove after use and dispose. Non-toxic.

## FR

Marqueur indicateur pour X-Ray et CT

1. Préparer la peau pour enlever l'excès de sébum et les poils si nécessaire.
2. Retirer le marqueur du support.
3. Appuyer la face adhésive du marqueur contre la peau.
4. Frotter fermement pour assurer une bonne adhésion.
5. Retirer et jeter après utilisation. Non-toxique.

## DE

Indikator Marker für X-Ray und CT

1. Bereiten Sie die Haut vor, indem Sie ggf. überschüssiges Fett und Haare entfernen.
2. Entfernen Sie den Marker von der Unterlage.
3. Drücken Sie den Marker mit der Klebeseite auf die Haut.
4. Drücken Sie den Marker fest an, um gute Haftung zu gewährleisten.
5. Nach Gebrauch entfernen und entsorgen. Ungiftig.